

エンゼルケア用品

Safetybandage®

臭いと浸出液を抑え、外傷部を保護するセーフティバンデージ

ご遺体の体液、血液には感染を引き起こす可能性があります。漏出を防止することで、故人の尊厳を守り
ご遺族にさらなる悲嘆を与えないとともに、ご遺体に関わる全ての方への感染リスクを減らすことに繋がります。



3つの特長

1. 安心

高分子吸収剤入りオリジナルゼリーで
体液・血液の漏出を防ぐ効果があります。



2. 消臭

高分子吸収剤入りオリジナルゼリーは
臭いを軽減する効果があります。

3. 汎用性

治療痕、外傷、腫瘍、ペースメーカー
抜去後、気管切開、褥瘡などいろい
ろな部位に使用できます。

ご遺体の処置で こんな事に悩んでいませんか？

治療痕や外傷部からの
体液、血液が
止まらないなあ。

臭いを止めたい。

退院後、体液や血液が
漏れてないかしら？



納棺現場からはこんな声が届いています。



- 布団をめくると注射痕から出血しており、浴衣と布団が血まみれになっていた。
- 気管切開痕に医療用テープだけで処置されていたが体液が染み出していた。
- 胃ろう痕にハンカチが置かれただけで処置されていなかった。

※ご遺体は人体の機能を失っているため、傷が治癒することがありません。たとえ小さな治療痕であっても穴が開いたままの状態です。そこから体液や血液、臭いが出続けてしまうケースがよく見られます。

「セーフティバンデージ」は、
.....
ご遺体のこのような問題を解決いたします！
.....

ご使用されている方の声

顔面に腫瘍があり、排膿も多かった。ご主人は生前に見た目も気にされていたし搬送中浸出液が出てこないか気になっていた。しっかりテープが密着し腫瘍も全く見えないきれいな状態になったと思う。ご家族も喜ばれ、安心されていたので嬉しかった。

腫瘍痕から臭いがひどく困っていたが、セーフティバンデージを使用すると臭いも止まり腫瘍痕も目立たなく処置できた。


長期療養により背面に広範囲のスキンテアが起きていた。セーフティバンデージを使用する事で、皮膚の剥がれと出血を同時に抑えることができた。

皮膚がんの自壊創患部から強い臭いがあり、ご家族も気にされていました。特殊吸収ゼリーで患部を覆うように処置が出来るので臭いが抑えられ、穏やかにお見送りすることができました。


セーフティバンデージ 製品について

セット内容

●大判テープ

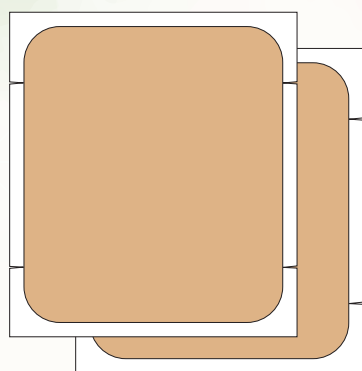


●綿状シート

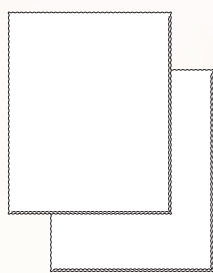

●ゼリー



使用方法 大判テープ・綿状シートは、患部の大きさに合わせてカットし、ご使用下さい。

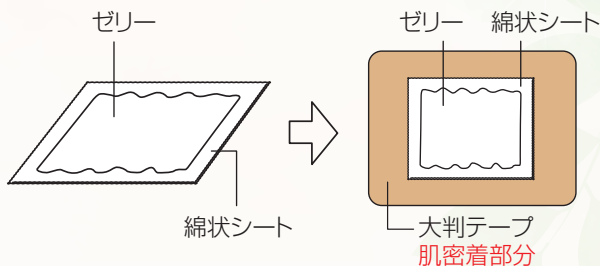


綿状シートを、使用したい部分（外傷や褥瘡発生部位）に合わせてカットし、チューブ内のゼリーを適量のせませず。

外傷や褥瘡発生部位に左記の綿状シートをあて、上から大判テープを貼ります。
※注）横漏れ防止の為、肌密着部分をしっかりと、必ず乾いた肌に密着させて下さい。

使用例

気管切開

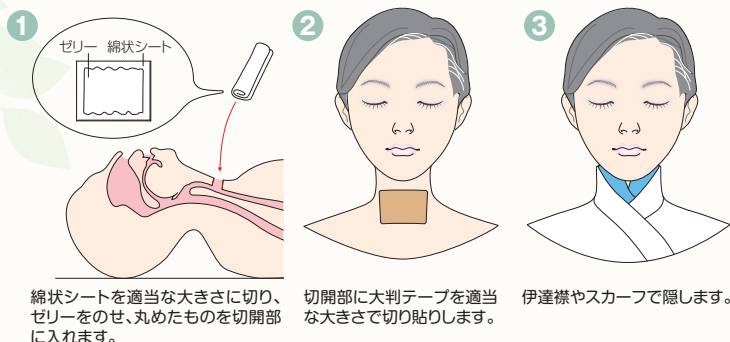


綿状シートを適当な大きさに切り、ゼリーをのせ、丸めたものを切開部に入れます。

切開部に大判テープを適当な大きさに切り貼ります。

伊達襟やスカーフで隠します。


褥瘡（かかと）

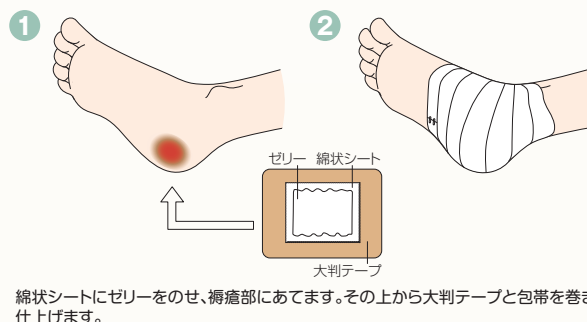

綿状シートにゼリーをのせ、褥瘡部にあてます。その上から大判テープと包帯を巻き、仕上げます。

ペースメーカー抜去後

縫合あり

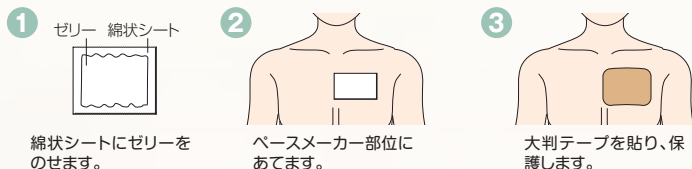


綿状シートにゼリーをのせませず。

ペースメーカー部位にあてます。

大判テープを貼り、保護します。

縫合なし

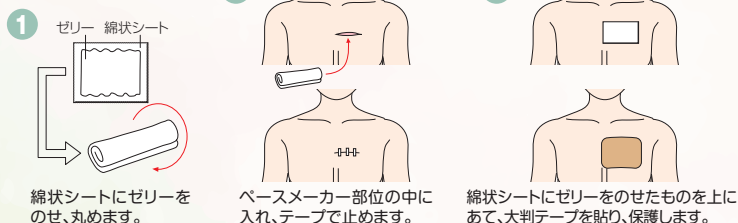


綿状シートにゼリーをのせ、丸めます。

ペースメーカー部位の中に入れ、テープで止めます。

綿状シートにゼリーをのせたものを上にあて、大判テープを貼り、保護します。

腫瘍（胸・首）

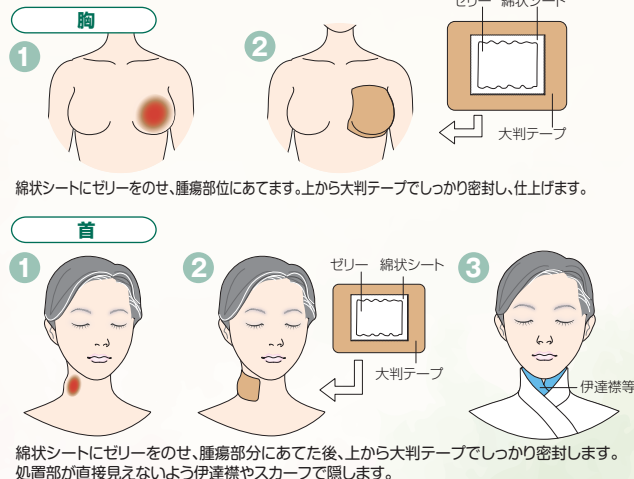

綿状シートにゼリーをのせ、腫瘍部にあてます。上から大判テープでしっかり密封し、仕上げます。

綿状シートにゼリーをのせ、腫瘍部分にあてた後、上から大判テープでしっかり密封します。処置部が直接見えないよう伊達襟やスカーフで隠します。

※大判テープは、濡れた箇所には使用出来ません。テープを貼る際は、必ず肌に密着させて下さい。※ご遺体以外には絶対に使用しないでください。※ご遺体の損傷が著しい場合、本品が機能しないことがあります。※セーフティバンデージは特許出願中です。

製造販売元

Humex 株式会社ヒュー・メックス

本社 〒733-0012 広島市西区中広町三丁目3-21
TEL.082-532-0361 FAX.082-295-6284
工場 〒738-0039 広島県廿日市市宮内工業団地3-2
TEL.0829-38-7303 FAX.0829-38-7304

<http://www.hum.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ・ご相談・ご質問は
下記連絡先までお気軽にお問合わせください。

082-532-0361